



Krokovací nastavitelné chodítko






LU600128

NÁVOD K POUŽITÍ

1. POPIS VÝROBKU

	REF.	POPIS
1	LU600128	SKLÁDACÍ CHODÍTKO, RECIPROČNÍ POHYB

2. TECHNICKÉ PARAMETRY

						
1	LU600128	54 cm	44 cm	46 cm	77-94 cm	100kg

3. POUŽITÍ

Chodítka mohou používat osoby s omezenou pohyblivostí pro pohyb v rámci domácnosti i mimo ni.

4. MONTÁŽ:

Chodítka se dodávají smontovaná a připravená k použití.

Další pokyny:

1. Pro složení nebo rozložení chodítka použijte rukojeti nebo tlačítko (je-li k dispozici).
2. Při použití chodítka pro sezení nebo stání zatlačte madla dolů, čímž zajistíte, že chodítko bude stát na místě a nebude klouzat.
3. Při používání chodítka se musíte opírat o obě madla stejně. Opírání se pouze o jedno madlo (bez doprovodu) může poškodit madlo nebo způsobit pád.

5. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA:

Před uskladněním nebo přepravou chodítko zavřete a složte pomocí rukojetí nebo tlačítka.

6. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Často čistěte každou část chodítka.
- Na povrchy, které je třeba čistit, používejte pouze hadřík a jemné mýdlo.
- Poté použijte čistý hadřík a před použitím výrobku jej dobře osušte.
- Pokud potřebujete výrobek dezinfikovat, použijte běžný, jemný dezinfekční prostředek.



POZOR: V případě poškození nebo poruchy výrobku výrobek **NEPOUŽÍVEJTE** a obraťte se na autorizovaného a vyškoleného zástupce.



DŮLEŽITÉ!

Před použitím chodítka se ujistěte, že:

- chodítka je v plné výsuvné poloze a je v této poloze zajištěno.
- Rukojeti jsou ve stejné výšce a šrouby, které je upevňují na rámu, jsou pevně dotažené.
- Na rámu nejsou žádné praskliny nebo zlomeniny.
- Chodítka pravidelně čistěte.
- Nenechávejte chodítka navlhout.
- Nenechávejte děti v blízkosti chodítka bez dozoru.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pokud jednoho dne zjistíte, že váš výrobek je třeba vyměnit nebo že vám již nevyhovuje, zvažte ochranu životního prostředí:

- 1) Nevyhazujte svůj výrobek spolu s ostatním veřejným odpadem (to je také smyslem zobrazené recyklační značky).
- 2) Obráťte se na orgány veřejné správy, které vás poučí o recyklačních střediscích, kam je třeba váš výrobek odevzdat.
- 3) Správná likvidace vašeho výrobku napomáhá ochraně životního prostředí i recyklaci součástí výrobku.

7. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Jsme výhradně odpovědní za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto prohlášení patří do třídy s nízkým rizikem (třída I) a splňují požadavky evropského nařízení 745/2017 a případně i normy a uvedených právních předpisů.

8. HLÁŠENÍ INCIDENTŮ:

Jakákoli závažná událost, ke které dojde v souvislosti s používáním prostředku, musí být nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel a/nebo pacient bydliště.

ZÁRUKA

Záruka se vztahuje na výrobní vady a NEZAHRNUJE škody vzniklé nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami, nadměrným používáním nebo nedodržením návodu k obsluze výrobku.

NEZAHRNUJE také díly, jako jsou brzdy nebo gumové koncovky, které se mohou během používání nebo v průběhu času opotřebovat.

Záruka se nevztahuje na poškození nebo závady způsobené přírodními katastrofami, neautorizovanou údržbou nebo opravou, problémy s napájením (v příslušných případech), dopravci.

Žádný servisní nebo náhradní díl se neuplatňuje, pokud nebyl zkontrolován autorizovaným servisním oddělením nebo výrobcem výrobku. Náklady na dopravu zboží v záruce hradí koncový uživatel - zákazník nebo prodejce.



















Adresa distributora:

LUKOV Plast s.r.o., IČ: 25023063, Zámecká 191, Český Dub, 463 43

www.lukovshop.cz , tel: +420 739 445 683, email: info@lukovshop.cz

Kontaktní adresa: **LUKOV Plast spol. s.r.o., Ještědská 287/37, 460 07 Liberec 7**

POPIS SYMBOLŮ

	LÉKAŘSKÝ PŘÍSTROJ		CE ZNAČKA
	VÝROBCE		DATUM VÝROBY
	ČÍSLO VÝROBKU		PŘED POUŽITÍM ČTĚTE MANUÁL
	SÉRIOVÉ ČÍSLO		NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE BALENÍ POŠKOZENÉ
	ČÍSLO ŠARŽE		TOUTO STRANOU NAHORU
	UNIKÁTNÍ IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ		CHRAŇTE PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM
	UDRŽUJTE V SUCHU		VÝŠKA STOHOVÁNÍ
	ZACHÁZET OPATRNĚ		KŘEHKÉ
	POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ		ELEKTROZAŘÍZENÍ