



MOBIAK®
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

PREMIUM Antidekubitní matrace s kompresorem

0806276 (0806277 & 0806278)

LU60030

NÁVOD K POUŽITÍ

1. POPIS VÝROBKU

Antidekubitní matrace jsou speciálně navrženy pro léčbu a pomoc při proleženinách u pacientů upoutaných na lůžko. Lze je použít v nemocnici i v domácnosti. Rovnoměrně rozkládají tlak na tělo a

Čerpadlo přepíná tlak vzduchu v matraci, čímž vytváří pocit lehké masáže a aktivuje cirkulaci krve.

Tento výrobek je indikován a navrhován pro pacienty, kteří pravděpodobně stráví na lůžku více než 15 hodin denně, a pro pacienty s nízkým až středním rizikem vzniku vředů a proleženin.

O vhodnosti používání této matrace konkrétním pacientem se poraďte s ošetřujícím lékařem, který zná jeho přesnou diagnózu.

2. POUŽITÍ

Pro matraci (0806277)

- Umístěte nafukovací matraci na matraci postele, přičemž nejprve napněte spodní prostěradlo a ujistěte se, že přívod vzduchu je na straně nohou.
- Zajistěte ji upevňovacími popruhy pod matrací.
- Přes nafukovací matraci umístěte tenkou prodyšnou tkaninu, pokud již není doplněna vlastním potahem, aby nepřišla do přímého kontaktu s pokožkou pacienta.

Pro kompresor (0806278)

- Připojte matraci k čerpadlu pomocí příslušných hadic, které jsou součástí balení. Připojte pumpu ke zdroji napájení, stiskněte spínač "ON/OFF" a otočte knoflíkem na maximum, aby se matrace nafoukla, PŘED použitím pacientem.
- Po úplném nafouknutí matrace můžete pomocí přepínače nastavit rozsah tlaku v závislosti na požadavcích uživatele.
- POZOR: STATICKÝ režim je určen pouze na 20 minut!!!
- Stisknutím "oranžového" přepínače vyberte statický tlak. Tento přepínač aktivuje nebo deaktivuje střídavé proudění vzduchu z čerpadla do matrace a zajišťuje nepřetržité proudění.

3. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Jsme výhradně odpovědní za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto prohlášení patří do třídy s nízkým rizikem (třída I) a splňují požadavky evropského nařízení 745/2017 a případně i normy a uvedených právních předpisů.

4. SPECIFIKACE

KOMPRESOR	Napájení	AC220-240V/ 50HZ
	Průtok vzduchu	≥ 5-6 lit/min
	Rozsah tlaku	50mmHg – 110mmHg
	Cyklus výměny vzduchu	12 MINUT
	Spotřeba energie	≤ 7 W ± 10%
	Hlasitost	≤ 30 dB ± 10%
	Rozměry (DxŠxV)	26 x 12,5 x 8,5 cm
	Váha	1,3 Kg
MATRACE	Maximální zatížení	130 Kg
	Barva	modrá
	Materiál	Zdravotnické PVC
	Tloušťka PVC	0,3 mm
	Rozměry (DxŠxV)	200 x 90 x 7.0 cm
	Délka hadice	120cm
	Váha	2 Kg

5. ÚDRŽBA

- K čištění matrace použijte měkký hadřík nebo houbu a vodu s jemným mýdlem.



POZOR: Nepoužívejte kyselé a žíravé roztoky.

- V blízkosti matrace nekuřte a nepoužívejte žádný plamen.
- Matrace nesmí přijít do styku s přímými zdroji tepla.
- Pokud potřebujete matraci uložit, vyprázdněte ji od vzduchu, složte ji.
- Uchovávejte nebo skladujte v čistém, suchém a dobře větraném prostředí.
- Před čištěním čerpadla jej odpojte od elektrické sítě.
- Čerpadlo čistěte suchým hadříkem.



POZOR: Čerpadlo nesmí přijít do styku s kapalinami.



6. VAROVÁNÍ

- Neodpojujte hadice, pokud je čerpadlo v provozu.
- V blízkosti matrace nepoužívejte ostré předměty.
- Nepřekračujte maximální zatížení (kg) doporučené výrobcem.
- Výrobek chraňte před oleji, pleťovými mléky a krémy, přikrytím vatovou tkaninou nebo osuškou.

- Při čištění matrace nepoužívejte abrazivní prostředky na bázi alkoholu. Mohlo by dojít k poškození materiálu vrstvy.
- Čalounění čistěte po každém každodenním použití.
Doporučujeme čalounění čistit jemným čisticím prostředkem, aby bylo chráněno před olejovými skvrnami a prachem. Běžnou praxí je použití rozprašovače naplněného směsí antibakteriálního mýdla a vody. Povrch postříkejte a poté otřete čistou utěrkou. Nejlepším řešením je čištění teplou vodou smíchanou s jemným mýdlem a následné důkladné vysušení.
- Chraňte svrchní vrstvu před poškrábáním, pořezáním a propíchnutím.
- Nenechávejte výrobek běžet, pokud jej nepoužíváte.



DŮLEŽITÉ!

V případě poškození nebo poruchy čerpadla se obraťte na distributora.



UPOZORNĚNÍ!

Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.

S přístrojem může pracovat pouze kvalifikovaný personál nebo personál vyškolený pro léčbu a prevenci proleženin.

Společnost MOBIAK S.A odmítá veškerou odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných zásahů do rámu výrobku.

Společnost MOBIAK S.A si vyhrazuje právo na změnu informací uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pokud jednoho dne zjistíte, že váš výrobek je třeba vyměnit nebo že vám již nevyhovuje, zvažte ochranu životního prostředí:

- 1) Nevyhazujte svůj výrobek spolu s ostatním veřejným odpadem (to je také smyslem zobrazené recyklační značky).
- 2) Obráťte se na orgány veřejné správy, které vás poučí o recyklačních střediscích, kam je třeba váš výrobek odevzdat.
- 3) Správná likvidace vašeho výrobku napomáhá ochraně životního prostředí i recyklaci součástí výrobku.

4) Elektrotechnické výrobky vzhledem ke svým konstrukčním materiálům, pokud nejsou správně zlikvidovány, mohou vést k ohrožení životního prostředí a dále ke zdravotním rizikům.

NÁHRADNÍ DÍLY

REF. ČÍSLO	POPIS
0806277	VZDUCHOVÁ MATRACE
0806278	KOMPRESOR

ZÁRUKA

Na výrobek je poskytována záruka dva (2) roky na čerpadlo a šest (6) měsíců na matraci a ostatní nemechanické části. Záruka se vztahuje na výrobní vady, nikoliv na škody vzniklé nesprávným používáním/údržbou výrobku.

Záruka se vztahuje na tovární vady & NEvztahuje se na škody vzniklé v důsledku nesprávného používání, špatné údržby, úprav, zneužití nebo nedodržení návodu k obsluze výrobku.

Záruka se nevztahuje na poškození nebo závady způsobené: přírodními katastrofami, neautorizovanou údržbou nebo opravou, problémy s napájením (v příslušných případech) a přepravními společnostmi.

HLÁŠENÍ INCIDENTŮ:

Jakákoli závažná událost, ke které dojde v souvislosti s používáním prostředku, musí být nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel a/nebo pacient bydliště.



















Adresa distributora:

LUKOV Plast s.r.o., IČ: 25023063, Zámecká 191, Český Dub, 463 43

www.lukovshop.cz , tel: +420 739 445 683, email: info@lukovshop.cz

Kontaktní adresa: **LUKOV Plast spol. s.r.o., Ještědská 287/37, 460 07 Liberec 7**

POPIS SYMBOLŮ

	LÉKAŘSKÝ PŘÍSTROJ		CE ZNAČKA
	VÝROBCE		DATUM VÝROBY
	ČÍSLO VÝROBKU		PŘED POUŽITÍM ČTĚTE MANUÁL
	SÉRIOVÉ ČÍSLO		NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE BALENÍ POŠKOZENÉ
	ČÍSLO ŠARŽE		TOUTO STRANOU NAHORU
	UNIKÁTNÍ IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ		CHRAŇTE PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM
	UDRŽUJTE V SUCHU		VÝŠKA STOHOVÁNÍ
	ZACHÁZET OPATRNĚ		KŘEHKÉ
	POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ		ELEKTROZAŘÍZENÍ