



MADLO K POSLTELÍ SUNDO
NÁVOD K POUŽITÍ


Instalace

Madlo k posteli se instaluje bez náradí – obsahuje pouze 4 trubkové části (1 hlavní část, 2 spojovací tyče, 1 nožní část) je nutné je zasunout do sebe pomocí pružinové spony (mosazný knoflík).

Poté se mezi lamelový rošt a matraci umístí madlo. Je drženo hmotností matrace, ale mělo by být také připevněno k roštu postele pomocí přiloženého bezpečnostního pásu.

Výška madla u postele je nastavitelná v 5 stupních.

Chcete-li to provést, stiskněte tlačítko mosazných tlačítek (2) umístěných na spojovacích trubkách (1) a vytáhněte / zatlačte hlavovou část (3) do požadované výšky. Poté tlačítka uvolněte a zasuňte je do jednoho z 5 otvorů na čele madla. Nakonec se patkový díl (5) nasune na spojovací trubky.

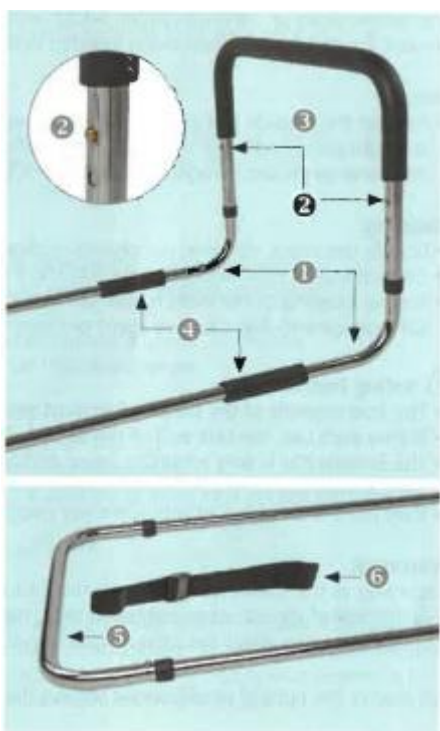

Důležité: Mosazný knoflík musí být viditelná.

Použití:

Madlo umožňuje pohodlnější sedání a vstávání z postele, bylo vyvinuto speciálně pro postele s lamelovými rošty. Pomůcka je vhodná i do postelí s nastavením zad. Nosník, potažený příjemnou gumou, poskytuje měkký a pohodlný dotek. Posuvná madla z jemné pryže, která jsou umístěna na spojovacích trubkách (4), zabraňují zasunutí zábradlí mezi lažky.

Umístěte zábradlí na postel, kam nejlépe dosáhnete. Madlo se jednoduše umístí na správné místo pod matraci v rámu. (Madlo je dostatečně široké, aby sloužila i jako ochrana proti vypadnutí z postele.)



Údržba madla:

- K čištění madla nepoužívejte ostré, abrazivní, mastné předměty a čisticí prostředky
- Ocelovou trubku čistěte vlhkým hadříkem a běžně dostupným čisticím prostředkem pro domácnost.
- K čištění částí z pryže se doporučuje použít vlhký hadřík nebo měkkou houbu a prostředek na mytí nádobí nebo mýdlovou vodu.

Bezpečnostní instrukce:

- Nosnost madla nesmí přesáhnout 100 kg.
- Před každým použitím je nutné zkontrolovat bezpečné usazení zábrany.
- Madlo slouží pouze k sezení či vstávání, nejedná se o hračku pro děti ani posilovací stroj.
- Používejte madlo pouze s dostatečnou stabilitou.

Záruka:

Podle zákonných záručních nároků.

Vyloučeno ze záruky: Ze záruky jsou vyloučena poškození způsobená nesprávným používáním, běžným opotřebením a závady, které mají jen nepatrný vliv na hodnotu nebo provozuschopnost zařízení. Technické změny a přídatná zařízení, stejně jako nesprávná údržba, vedou ke ztrátě záruky a odpovědnosti za výrobek obecně. vyhrazujeme si právo na změny, které jsou v zájmu technického zlepšení.

Adresa distributora:

LUKOV Plast s.r.o., IČ: 25023063, Zámecká 191, Český Dub, 463 43

www.lukovshop.cz , tel: +420 739 445 683, email: info@lukovshop.cz

Kontaktní adresa: **LUKOV Plast spol. s.r.o., Ještědská 287/37, 460 07 Liberec 7**