



## **PODPĚRA ZAD POLOHOVATELNÁ**

**LU600290**

**Návod k použití**

1. Účel použití:

Zádová opěrka vám umožní v posteli pohodlně ležet a sedět. To může mít relaxační účinek zejména v případě nemoci, kdy je potřeba delší pobyt na lůžku a chybí polohovatelné čelo postele. S pěti nastavitelnými výškami lze zvolit různou výšku mezi sezením a ležením. Bez vlastní síly můžete udržovat potřebnou vzpřímenou polohu vsedu k jídlu. Připevněný polštář pomocí popruhů a suchého zipu poskytuje v případě potřeby další odpružení v oblasti hlavy.

2. Před prvním použitím:

Zkontrolujte prosím úplnost zboží. V případě poškození či neúplnosti kontaktujte prodejce.

3. Montáž:

- Zádová opěrka se dodává kompletně předmontovaná.
- Rozložte opěrku a umístěte jí do postele tak, aby spodní opěrná tyč se zaoblenými rohy končila u čela postele.
- Požadovaný sklon sedáku se dá nastavit.
- Chcete-li opěrku nastavit do požadované polohy, uvolněte držák mírným zatažením a poté jej opět zajistěte v jiné, požadované poloze.
- Po použití lze zádovou opěrku z lůžka sejmout a složit pro úsporu místa.

4. Použití:

Před každým použitím se prosím ujistěte, že je zádová opěrka bezpečně zajištěna v určených prohlubních.

Zádová opěrka musí být vždy připevněna k čelu postele. Zádovou opěrku vždy zatěžujte uprostřed, maximální nosnost je 125 kg.

5. Čištění a desinfekce

- K čištění nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky. Zádovou opěrku čistěte jemným čisticím prostředkem pro domácnost nebo mýdlovou vodou.
- Důležité: Při používání desinfekčního prostředku dbejte pokyny výrobce.

6. Záruka:

Ze záruky jsou vyloučeny škody způsobené nesprávným používáním, běžným opotřebením a spotřebou, jakož to i vady, které mají pouze zanedbatelný vliv na hodnotu nebo použitelnost výrobku. Technické změny, úpravy a doplňky, stejně jako nesprávná údržba ruší záruku a odpovědnost za výrobek. Vyhazujeme si právo na změny za účelem technického vylepšení