



PĚNOVÝ NÁSTAVEC NA WC 10 CM, MODRÝ

NÁVOD K POUŽITÍ

Účel

Zvýšené WC sedátko SOFT BLAU je zdravotnický prostředek a je určené ke zvýšení sedátka na WC. Je navržené jako pomůcka pro sezení a vstávání pro osoby se sníženou pohyblivostí. Vyvýšené WC sedátko SOFT BLAU se umísťuje přímo na stávající WC sedátko.

Indikace

Stavy celkové slabosti, omezená pohyblivost páteře/kyčelních a kolenních kloubů.

Kontraindikace

Silné závratě, zhoršená rovnováha, stavy zmatenosti (nutné použití s doprovodem!)

Popis

Zvýšené WC sedátko SOFT BLAU slouží ke zvýšení toalety pro pohodlnou a bezpečnou toaletní hygienu. Je vyrobeno z měkké PU pěny a může tak pomoci předcházet otlakům při delším sezení, integrovaný výřez v přední a zadní části sedací části usnadňuje hygienu. Díky beznástrojové instalaci na záchodové prkénko lze vyvýšený záchod SOFT BLAU používat všude, i na cestách. Je k dispozici ve výšce 5 nebo 10 cm, výběr, instalaci a návod k použití smí provádět pouze autorizovaný odborný prodejce.

Zvýšené záchodové prkénko smí přijít do kontaktu pouze s neporušenou, neporaněnou kůží u pacienta. Jiné použití, než je uvedeno výše, není zamýšleno. Sundo GmbH neručí za žádné z toho vyplývající škody, riziko nese výlučně uživatel.

Před použitím/údržbou

Nejprve si přečtěte celý tento návod k použití. Před prvním a každým použitím prosím zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený. Při každém použití, také zkontrolujte bezpečné usazení zvednutého záchodového sedátka. V případě známek poškození, opotřebení se zvýšené WC sedátko SOFT BLAU již nesmí používat. Není nutná žádná budoucí údržba.

Montáž

Výrobek by měl montovat pouze autorizovaný, vyškolený personál. Zvedněte víko toalety a umístěte vyvýšené sedátko SOFT BLAU přímo na sedátko. Ujistěte se, že přední stažená část zvedáku je v závislosti na provedení toalety přímo v kontaktu s přední částí toaletního prkénka/misky, aby nemohlo dojít k uklouznutí.

Aplikace

Zkontrolujte bezpečné uchycení záchodového prkénka a v případě potřeby jej znovu seřídte. Poté se posadte doprostřed. K usednutí a vstávání vždy používejte pomoc pečovatele. Nyní proveďte hygienu toalety.

Čištění/dezinfekce

Vyvýšené záchodové sedátko SOFT BLAU pravidelně čistěte vlhkým hadříkem/měkkou houbou a vhodným jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte agresivní nebo kyselé čisticí prostředky, které mohou narušit materiál (PU). V případě potřeby lze vyvýšené záchodové prkénko ošetřit vhodným dezinfekčním prostředkem bez chlóru. **Důležité:** dodržujte prosím aplikační předpisy výrobce.

! Bezpečnostní instrukce

- Sedněte si vždy doprostřed sedadla a nenaklánějte se trhaně nebo příliš dopředu nebo do strany
- Ujistěte se, že před nebo při použití zvednuté záchodové prkénko neklouže (nebo nesklouzlo)
- Záchodové sedátko se smí používat pouze k výše popsanému účelu vsedě, nikdy na sedátko nestoupejte
- Výrobek se nesmí používat, pokud uživatel nemůže udržet rovnováhu při sezení, jinak hrozí pád!
- Nepoužívejte mastné nebo mastné čisticí prostředky, hrozí nebezpečí uklouznutí a pádu

Záruka

Dle zákonných záručních nároků.

Ze záruky jsou vyloučeny: Poškození v důsledku nesprávného používání, běžné opotřebení a také vady, které mají pouze nepodstatný vliv na hodnotu provozuschopnosti zařízení. Technické změny a doplňky, stejně jako údržba ruší záruku a obecně ruší odpovědnost za výrobek. Vyhraujeme si právo na změny, které jsou v zájmu technického zlepšení.

Adresa distributora:

LUKOV Plast s.r.o., IČ: 25023063, Zámecká 191, Český Dub, 463 43

www.lukovshop.cz , tel: +420 739 445 683, email: info@lukovshop.cz

Kontaktní adresa: **LUKOV Plast spol. s.r.o., Ještědská 287/37, 460 07 Liberec 7**